

3M™ Fästeanordning för tuber


Denna starka, lättanvända lösning fixerar icke-kritiska medicinska tuber/katetrar tillverkade i silikon, PVC och silikonöverdragen latex. Den är skonsam mot huden och utformad för att förebygga tryckskador och häftämnesrelaterade hudskador (MARSI).

Unik design

Utformad för att lyfta tuben/katetern från huden vilket underlättar konsekvent applicering.

Steril

I förpackning för engångsbruk.

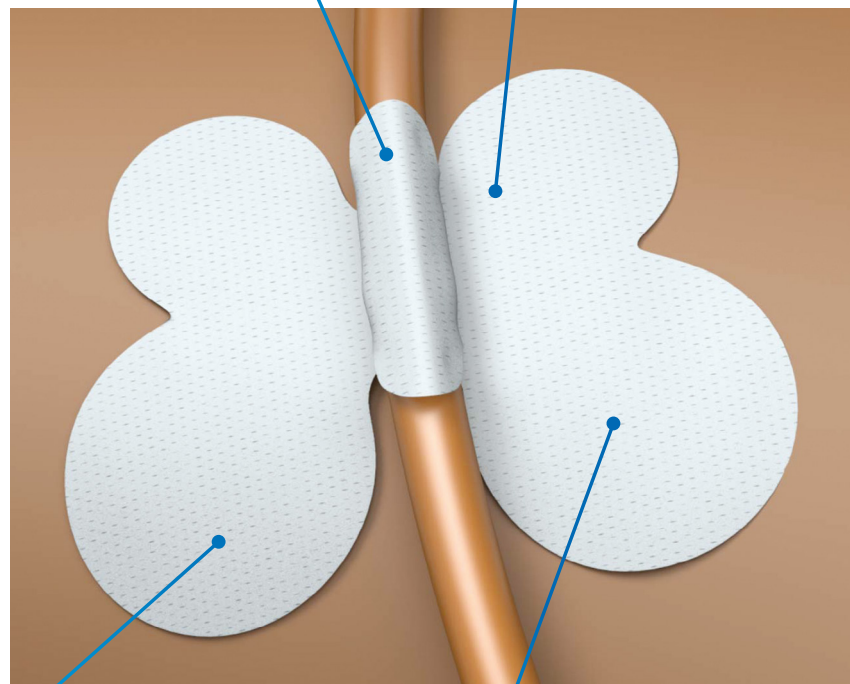

Förstärkt och mjuk baksida

Ger säker fixering och flexibilitet.

Två storlekar

Storlek small för tuber/katetrar 6-12 Fr.
Storlek large för tuber/katetrar 12-24 Fr.



Hudvänliga egenskaper: Fjädern används som märkning av produkter som ger stark och säker fixering samtidigt som de minimerar hudskador

Pålitlig fixering

Unikt häftämne fixerar medicinska tuber och katetrar i upp till fyra dagar.¹

Enkel användning

Enkel att applicera och kan tas bort i ett stycke, vilket underlättar standardiserad teknik.

Skonsam mot huden

Det hypoallergena silikonhäftämnet har låg risk att orsaka dermatit och ger minimal smärta och skada på huden vid borttagning.¹

Utformad för minska risken för tryckskada

Produkten har inga hårda komponenter som kan orsaka tryck och den unika formen minimerar kontakten mellan hud och tub/kateter.


Många faktorer måste övervägas när det gäller att välja fixering, t.ex. häftförmåga, hudvänlighet och användarvänlighet. Nedan presenteras resultat från jämförande studier.

En jämförelse av 3M™ Fästanordning för tuber och StatLock® Foley fixeringsenhet.¹

Användningstid

Pålitlighet och användningstid är viktiga faktorer när det gäller att välja rätt produkt.

3M™ Fästanordning för tuber uppvisade en statistiskt större andel tuber/katetrar kvar på plats efter 72 timmar än StatLock® Foley Fixeringsenhet.*

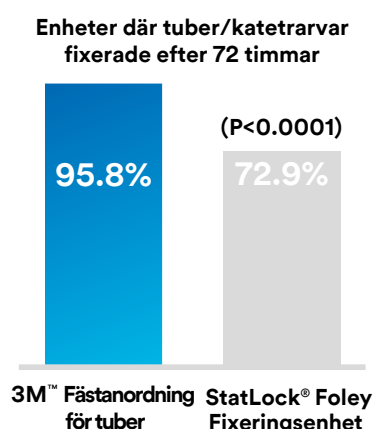

Hudbarriär

Huden är kroppens första försvar mot infektion och därför är det viktigt att skydda den.

Följande jämförelse tar upp effekter på hudens barriärfunktion (uppmätt genom genomsnittlig förändring av Transepidermal Water Loss (TEWL) jämfört med före behandlingen).



Borttagningstid

Det är viktigt med effektiv borttagning när klinikers tid är begränsad.

Den genomsnittliga tiden för borttagning av 3M™ Fästanordning för tuber var 13 sekunder, jämfört med 126 sekunder för StatLock® Foley Fixeringsenheten. (P<0,0001).



Utrustning för borttagning

Extra tillbehör kan öka tiden och kostnaden för en process.

I genomsnitt behövdes 12 våtservetter med alkohol för borttagning av StatLock® Foley Fixeringsenheten. För 3M™ Fästanordning för tuber kvävdes inga våtservetter för borttagning.*

Genomsnittligt antal våtservetter som användes för borttagning



Känn dig trygg med ditt val. Förlita dig på vetenskapen bakom 3M™ Fästanordning för tuber för pålitlig fixering.

För mer information kontakta din 3M-representant.

Se produktens bruksanvisning för ytterligare viktig information.

Beställningsinformation

Produkt	Produktnamn	Artikelnummer	Storlek	Enheter/förpackning	Fp/lev.fp
	3M™ Fästanordning för tuber, Large	1501U	5.5cm x 9.0cm	25	4
	3M™ Fästanordning för tuber, Small	1500U	4.3cm x 6.1cm	25	4

3M Svenska AB
Herrjärva torg
170 67 Solna

*Enligt resultat från en jämförande, prospektiv klinisk studie av 24 friska personer under tre dagars användning följt av enhetsborttagning från huden i enlighet med bruksanvisningen.

© 2022 3M. Med ensamrätt. 3M och andra varumärken som visas är varumärken och/eller registrerade varumärken. Obehörig användning är otillåten. 3M-varumärken används på licens i Kanada. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. GL_ENG_70-2013-1339-5

