


Går på djupet med debrideringen

- För de mest svåråtkomliga sårytorna

Med sin innovativa och unika uppbyggnad ger **Debrisoft® Lolly** dig möjlighet att enkelt göra rent även i djupare kaviteter och fistelgångar där ingen dyna kommer åt



fibre technology
ACTITOP

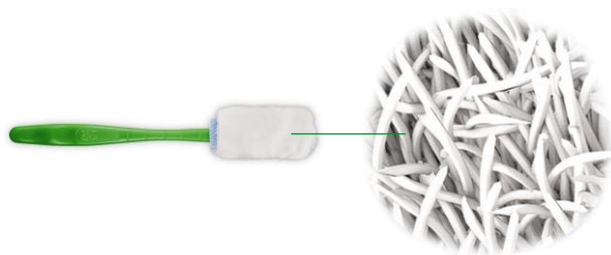

Den enda i sitt slag

Huvudet på **Debrisoft® Lolly** består av monofilamenta polyesterfibrer med den unika Actitop-teknologin. Huvudet är fastsytt med dubbla sömmar på ett **greppvänligt handtag** av polypropylen och har en kantsöm av blå röntgensynlig tråd

Ett snabbt resultat



- Sparar tid och därför pengar
- Gör rent såret på **2-4** minuter
- Effektiv mot biofilm

Enkel att använda




- Lolly är intuitiv att använda
- 95% värderar den som mycket bra eller excellent

Närmast smärtfri



- För en bättre följsamhet
- 95,4% upplever ingen eller bara lindrig övergående smärta vid debridering *

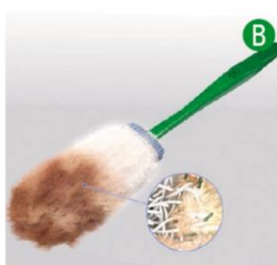


Indikationer (A)

- Tryckskador
 - Kirurgiska sår
 - Svåråtkomliga sår
- Observera att pinnen kan användas såväl till djupa sår som till ytligare sår

Funktion (B)

De patenterade fibertrådarna avlägsnar debris och exsudat från såret genom att binda smutsen till sig för skonsam och effektiv debridering

* Bahr, S. et al. (2011) 'Clinical efficacy of a new monofilament fibre-containing wound debridement product'

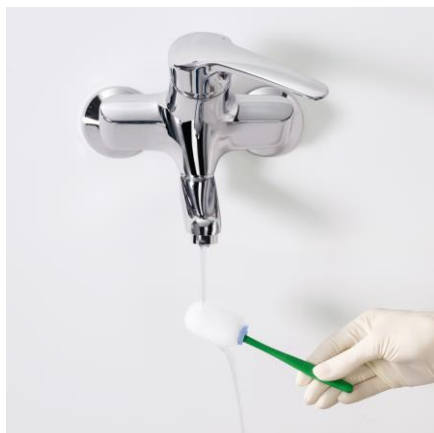

Användaranvisning

- Fukta huvuddelen med vanligt vatten eller NaCl, enligt lokala rutiner för omläggning (ca 5-15 ml)
- Använd fiberhuvudet mot sårytan för att med ett lätt tryck göra rent såret och svåråtkomliga områden
- Vid behov kan en Debrisoftdyna användas för att rengöra huden runt såret
- Efter debridering läggs såret om enligt aktuell omlägningsordination och lokala rutiner

Försiktighetsåtgärder

- Låt inte **Debrisoft® Lolly** sitta kvar i såret
- Får inte föras in i sår med öppning mindre än fiberhuvudet
- Fiberhuvudet får varken klippas eller tas loss från handtaget
- Undvik allt för kraftigt tryck då det kan orsaka smärta och/eller skador på vävnader
- Var uppmärksam när produkten används vid fistlar med oklara förbindelser



Debrisoft® Lolly levereras i en storlek

Lev.art.nr	Storlek	Avd.fp	Trp.fp
33 224	5 cm (huvuddel) 15,5 cm inkl. skaft	5	50



Produktmaterial

- Huvuddelen består av monofilamenta polyesterfibrer, insida av polyakrylat samt röntgentråd av polypropylen
- Skaftet består av polypropylen
- Produkten är separat förpackat och EO-steriliserad

Debrisoft® Lolly

- är CE-märkt
- förvaras torrt och rent i rumstemperatur
- är hållbar i 3 år från produktionsdatum
- har en förpackning av cellulosa, polyester och polypropylen
- har en avdelningsförpackning av cellulosa vilken källsorteras som pappersförpackning
- kommer i en transportkartong i wellpapp av cellulosa vilken källsorteras som kartong
- produkten hanteras som brännbart avfall